


هایساید اس-۱۲۵

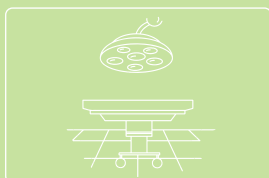

محلول ضدعفونی کننده غیر الکی و آماده به مصرف مخصوص سطوح، تجهیزات و ابزار پزشکی

هایساید اس-۱۲۵ یک محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف و سریع اثر مخصوص ضدعفونی سطوح، تجهیزات و ابزار پزشکی می باشد. این محصول به واسطه فرمولاسیون سریع اثر، اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف، پایداری مناسب و سازگاری با محیط زیست، بهترین انتخاب برای ضدعفونی انواع سطوح و ابزار می باشد.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف و سریع اثر
- سازگار با محیط زیست
- بدون نیاز به آبکشی
- پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی همزمان
- فرمولاسیون پتنت شده



مشخصات محصول


رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ
pH	۱/۸-۳/۲
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۱۸ ماه



THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری

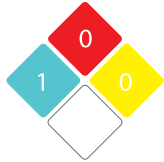

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید اس-۱۲۵)
- ۱/۵ گرم هیدروژن پراکساید
- ۰/۲۵ گرم دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید

مواد جانبی

- عوامل کمپلکس دهنده
- پایدار کننده
- بازدارنده خوردگی
- آب دیونیزه

Microbiological Effectiveness

منطبق با استانداردهای اروپایی	
اثر بخشی علیه باکتری	
According to EN 13727 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus aureus/ ATCC 6538 Enterococcus hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa/ ATCC 15442
According to EN 13697 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus aureus/ ATCC 6538 Enterococcus hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa/ ATCC 15442 Escherichia coli/ ATCC 10536
According to EN 14561 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus aureus/ ATCC 6538 Enterococcus hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa/ ATCC 15442
اثر بخشی علیه مخمر	
According to EN 13624 (contact time: 5 minutes)	Candida albicans/ATCC 10231
According to EN 13697 (contact time: 5 minutes)	Candida albicans/ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes)	Candida albicans/ ATCC 10231
اثر بخشی علیه قارچ	
According to EN 13624 (contact time: 5 minutes)	Aspergillus niger/ATCC 16404
اثر بخشی علیه ویروس	
According to EN 14476 (contact time: 5 minutes)	Adenovirus Herpes simplex virus (HSV-I)

روش مصرف

ضدعفونی سطوح: محصول هایساید اس-۱۲۵ را مستقیماً بر روی سطح مورد نظر اسپری نموده یا از پارچه ای تمیز استفاده کنید. ۵ دقیقه صبر نمایید تا فرآیند ضدعفونی کامل شود.

ضدعفونی ابزار: محصول هایساید اس-۱۲۵ را درون تانک ضدعفونی بریزید. ابزار را کاملاً در آن غوطه ور نموده و ۵ دقیقه صبر نمایید. سپس ابزار را آبکشی نمایید.

سازگاری

هایساید اس-۱۲۵ با اکثر مواد از قبیل فولاد زنگ نزن، پلاستیک، پلی پروپیلن، مس، PVC و سیلیکون سازگار است.