



هایساید ای زد-۳۰



شوینده آنزیمی غلیظ مخصوص ابزار جراحی و آندوسکوپ ها

هایساید ای زد-۳۰ یک شوینده غلیظ و ترکیبی از آنزیم پروتئاز (Subtilisin) و سورفکتانت های با کف کم است. این محصول مناسب برای حذف آلودگی های پروتئینی از اسکوپ های انعطاف پذیر و ابزار جراحی می باشد.

مزایای مصرف

- ترکیب منحصر به فرد از آنزیم پروتئاز (Subtilisin) و سورفکتانت های با کف کم
- حذف ایمن آلودگی های پروتئینی
- pH خنثی
- غیر ساینده و غیر سمی
- زیست تخریب پذیر

مشخصات محصول



رنگ / شکل	محلول شفاف و بی رنگ
pH	۶ - ۹
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
حلالیت (در آب)	محلول



THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری



Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید ای زد-۳۰)
- آنزیم پروتئاز (Subtilisin)
 - سورفکتانت ها
 - پایدار کننده آنزیم
 - عوامل تنظیم کننده pH
 - رنگ
 - آب دیونیزه

مشخصات میکروبی

According to USP 40	Bacterial count <10 CFU/10g
	Yeast & mold total count < 10 CFU/10g
	No growth of Staphylococcus. aureus
	No growth of Pseudomonas. aeruginosa
	No growth of Escherichia. coli
	No growth of Fungi



روش مصرف

ابزار جراحی: هایساید ای زد-۳۰ را با آب گرم (۲۰-۴۵ درجه سانتی گراد) تا ۱٪ رقیق کنید. سپس ابزار را به مدت زمان مورد نیاز (بسته به میزان آلودگی) در آن غوطه ور کرده و سپس آبکشی نمایید. (ترجیحاً با آب گرم)

اسکوپ های انعطاف پذیر:

هایساید ای زد-۳۰ را با آب گرم تا غلظت ۱٪ رقیق کنید. محلول را با فشار در کانال های ابزار وارد نموده و به مدت زمان مورد نیاز (بسته به میزان آلودگی) بخیسانید. بخش های خارجی را با محلول رقیق شده بشوئید. کانال ها و بخش های خارجی را به طور کامل با آب مقطر یا آب شیر (ترجیحاً آب گرم) آبکشی کنید.

ماشین های شستشوی اتوماتیک آندوسکوپ:

بر اساس توصیه شرکت سازنده دستگاه های شستشوی اتوماتیک مصرف شود.

حمام اولتراسونیک: هایساید ای زد-۳۰ را با آب تا ۱٪ رقیق نموده و در تانک اولتراسونیک بریزید. دمای تانک را حداکثر ۴۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. ابزار را به مدت حداقل ۵ دقیقه غوطه ور نموده و سپس آبکشی نمایید. (ترجیحاً با آب گرم)

سازگاری

هایساید ای زد-۳۰ با اکثر مواد از قبیل فولاد زنگ نزن، پلاستیک، رابر و سیلیکون سازگار است.