

اندواستریل

محلول ضد عفونی سطح بالا مخصوص تجهیزات پزشکی نیمه بحرانی


هایسپت اندواستریل یک محلول ضد عفونی کننده سطح بالا و مناسب برای آندوسکوپ، ابزار و دستگاه های پزشکی نیمه بحرانی است. این محصول بر پایه پراستیک اسید و دارای اثر بخشی آنتی میکروبیال علیه میکروارگانیسم های بیماری زا شامل باکتری، مخمر، قارچ، مایکوباکتریوم، انواع ویروس های پوشش دار و بدون پوشش و اسپور باکتریایی می باشد.

مزایای مصرف

- محلول آماده به مصرف
- حاوی حداقل ۹۰۰ ppm پراستیک اسید
- اثر بخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- قابلیت استفاده مجدد تا ۱۴ روز
- فاقد آکدهید و ترکیبات آمونیوم چهارتایی
- فاقد بوی آزار دهنده
- عدم خاصیت تثبیت پروتئین ها و بقایای آلی

مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول بی رنگ و شفاف
pH	> ۱
بو	بوی مشخصه پراستیک اسید
طول عمر قفسه ای	۱۲ ماه

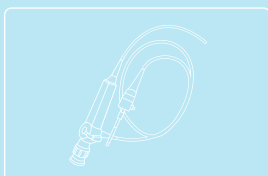


THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

حجم ۵ لیتری

۳ عدد در هر کارتن

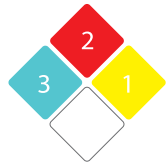

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	3
Flammability	2
Reactivity	1



هشدار

- محفظه‌ی ضدعفونی همواره با یک درپوش پوشانده شود. در صورت نگهداری در ظرف دربسته، محلول حداکثر تا ۱۴ روز قابل استفاده خواهد بود.
- در صورت تماس با پوست یا چشم‌ها سریعاً موضع را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- دور از دسترس کودکان و افراد نا آگاه قرار گیرد.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هائیسپت اندو استریل)
• حداقل ۹۰۰ ppm پراسیتیک اسید

مواد جانبی

- هیدروژن پراکسید
- استیک اسید
- عوامل بافوری کننده
- عوامل بازدارنده خوردگی
- پایدار کننده
- آب دیونیزه

مشخصات میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 10 minutes)	Staphylococcus aureus/ ATCC 6538 Enterococcus hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa/ ATCC 15442 Escherichia coli/ ATCC 10536
--	--

According to EN 14561 (contact time: 10 minutes)	Staphylococcus aureus/ ATCC 6538 Enterococcus hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa/ ATCC 15442
--	--

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 10 minutes)	Candida albicans/ ATCC 10231
--	------------------------------

According to EN 14562 (contact time: 10 minutes)	Candida albicans/ ATCC 10231
--	------------------------------

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 10 minutes)	Aspergillus niger/ ATCC 16404
--	-------------------------------

According to EN 14562 (contact time: 10 minutes)	Aspergillus niger/ ATCC 16404
--	-------------------------------

اثر بخشی علیه میکوباکتریوم

According to EN 14348 (contact time: 10 minutes)	Mycobacterium avium/ ATCC 15769
--	---------------------------------

اثر بخشی علیه اسپور باکتریایی

According to EN 13704 (contact time: 60 minutes)	Bacillus subtilis/ ATCC 6633
--	------------------------------

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14467 (contact time: 5 minutes)	Herpes simplex virus (HSV-1) Adenovirus type 5
---	---

روش مصرف

شستشو:

قبل از شروع فرآیند ضدعفونی با هائیسپت اندو استریل، لازم است ابتدا آلودگی ظاهری ابزار و دستگاه پزشکی با استفاده محلول شوینده آنزیمی (از قبیل هائیسپت انزومدیک ۱۷) شسته و حذف شوند.

فرآیند ضدعفونی:

ابزار تمیز و فاقد آلودگی ظاهری را داخل محلول آماده به مصرف هائیسپت اندو استریل غوطه‌ور نمایید، بطوریکه تمامی حفره‌ها پر شده و حبابی باقی نماند، درب محفظه را بسته و به مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید. سپس ابزار را خارج نموده و با آب تمیز آبکشی نمایید.

سازگاری

هائیسپت اندو استریل با اکثر مواد از قبیل فولاد زنگ نزن، پلی اتیلن، PVC، پلی کربنات، رابر، لاستیک و سیلیکون سازگار است.

Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad