




هایساید اولتراسونیک

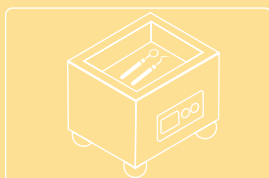

محلول شوینده غلیظ مخصوص شستشوی ابزار دندانپزشکی و جراحی

هایساید اولتراسونیک یک محلول غلیظ بدون کف، بر پایه مواد قلیایی با کارایی بالا است که مناسب برای پاکسازی موثر ابزارهای دندانپزشکی و جراحی مانند ساینده ها، حامل های آمالگام، اسپاتول، الواتورهای دندانپزشکی، فورسپس اکسترکشن و سایر ابزار دقیق می باشد. این محصول فاقد آکدئید و فنل است و توانایی از بین بردن رسوبات، بقایای بافت، خون، پروتئین، حتی سیمان و گچ را دارد.

مزایای مصرف

- پاک کننده بقایای سخت مانند خون، بزاق و گچ
- عملکرد پاک کننده قوی
- فاقد آکدئید، فنول و کلر
- قابل استفاده برای شستشوی دستی و اولتراسونیک

مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۱۲ <
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
حلالیت (در آب)	محلول



Special for
Infection Control
in Dental Settings

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپساید اولتراسونیک)


- پتاسیم هیدروکسید
- سورفکتانت
- عوامل کمپلکس دهنده
- آب دیونیزه

مشخصات میکروبی

According to USP 40	Bacterial count <10 CFU/10g
	Yeast & mold total count < 10 CFU/10g
	No growth of Staphylococcus. aureus
	No growth of Pseudomonas. aeruginosa
	No growth of Escherichia. coli
	No growth of Fungi

بسته بندی

۲ عدد در هر کارتن	حجم ۱۰ لیتری
۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۳۰ عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری

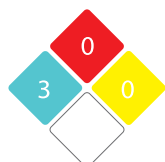

Hazard Rating

Concentrate	NFPA
Health	3
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

روش مصرف

محلول غلیظ باید قبل از استفاده با آب تا غلظت ۵٪ رقیق شود. از آن برای دستگاه اولتراسونیک به مدت ۳۰ دقیقه استفاده کنید. سپس ابزار را کاملاً آبکشی نمایید.

سازگاری

برای تمیز کردن ابزارهای دارای کد رنگی و ابزارهای ساخته شده از موهای طبیعی، نایلون یا آلومینیوم استفاده نکنید. قبل از استفاده برای اولین بار، سازگاری مواد را تست کنید.