


اینسترو

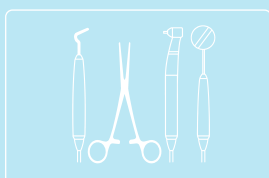

محلول ضد عفونی کننده غلیظ مخصوص ابزار جراحی

هایسپت اینسترو یک محلول ضد عفونی کننده غلیظ و مناسب برای ضد عفونی ابزار جراحی قبل از فرآیند استریلیزاسیون است. این محصول به واسطه فرمولاسیون آنتی میکروبیال، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا از قبیل باکتری، مخمر، قارچ و انواع ویروس ها می باشد. هایسپت اینسترو به واسطه وجود ترکیبات بازدارنده خوردگی در فرمولاسیون خود سازگار با انواع مواد می باشد. ماهیت فاقد آلوده کننده این محصول از رنگبری و یا تثبیت خون و پروتئین جلوگیری می کند.

مزایای مصرف

- اثر بخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- عملکرد پاک کنندگی مناسب
- فاقد فتل، آلوده کننده و کلر
- قابلیت استفاده در حمام های اولتراسونیک
- قابلیت استفاده مجدد تا ۱۴ روز (بسته به سطح آلودگی)




مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۷-۱۰
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
انحلال پذیری (در آب)	کاملاً محلول

بسته بندی

۶	عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۳	عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری

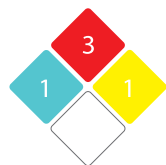

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	3
Reactivity	1



هشدار

- درب محفظه‌ی ضدعفونی همواره با یک درپوش پوشانده شود. در صورت نگهداری در ظرف دربسته، محلول تا ۱۴ روز قابل استفاده خواهد بود.
- در صورت تماس با پوست یا چشم‌ها، بلعیدن یا استنشاق خطرناک است. دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپسپت اینسترو)
- ۳/۸ گرم پلی هگزامتیلین بیگوانید هیدروکلراید
- ۵/۶ گرم دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید

مواد جانبی

- سورفکتانت
- عوامل بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- آب دیونیزه

مشخصات میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14652 (contact time: 30 minutes use dilution: 2%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Herpes simplex virus(HSV-1)
---	-----------------------------



روش مصرف

این محلول کنسانتره را باید پیش از مصرف با آب تا ۲٪ رقیق نموده و سپس ابزار تمیز و فاقد آلودگی ظاهری را به طور کامل درون محلول رقیق شده به مدت حداقل ۱۵ دقیقه غوطه ور نمایید.

سازگاری

هایسپت اینسترو با انواع مواد از قبیل استیل ضد زنگ، مس، پلاستیک، رابر و سیلیکون سازگار است.