

توسط محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین

پیش تمیز کردن

۱ پاکسازی سطوح خارجی



سطوح خارجی آندوسکوپ را با پارچه نم دار به آرامی تمیز کنید.

۲ پاکسازی داخل کانال ها



با ساکشن یا سرنگ، آب و سپس هوا را از داخل کانالها عبور دهید تا از آلودگی های درشت پاک شوند. (با ساکشن حداقل ۱۰ ثانیه/ با سرنگ حداقل ۳ بار)

۳ جداسازی تجهیزات جانبی



تجهیزات جانبی اضافی را جدا کنید.

۴ برس کشی کانال ها



آندوسکوپ را در شوینده آنزیماتیک غوطه ور کنید. با یک پارچه سطوح خارجی را دستمال بکشید. تمامی پورت ها و کانال های دستگاه را با برس نرم و مخصوص برس بکشید.

۵ شستشوی دستی



آندوسکوپ را در محلول شوینده آنزیمی غوطه ور نگه دارید. با سرنگ و تجهیزات شستشو داخل کانال های دستگاه را با شوینده آنزیمی پر کنید. (حداقل ۳ بار)

۶ شستشوی سطوح خارجی با شوینده آنزیمی



در حین غوطه وری، سطوح خارجی را با یک پارچه بدون پرز دستمال بکشید. آندوسکوپ را به مدت مورد نیاز در محلول شوینده آنزیمی به حالت غوطه وری قرار دهید.

۷ آبکشی آندوسکوپ



آندوسکوپ را در آب تمیز غوطه ور کنید. با سرنگ آب تمیز را از داخل کانال ها عبور دهید، تا از باقیمانده شوینده پاک شوند. (حداقل ۳ بار) سطوح خارجی آندوسکوپ را نیز بشویید.

۸ خشک کردن آب اضافی




آندوسکوپ را از آب خارج کنید. با تزریق هوا کانال ها را خشک کنید. سپس با یک پارچه تمیز بدون پرز آب اضافی را از روی دستگاه خشک کنید.

۹ برگردن کانال ها با گندزدا



آندوسکوپ را در محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین غوطه ور کنید. با سرنگ کانال های دستگاه را از محلول پر کنید.

۱۰ غوطه وری در گندزدا

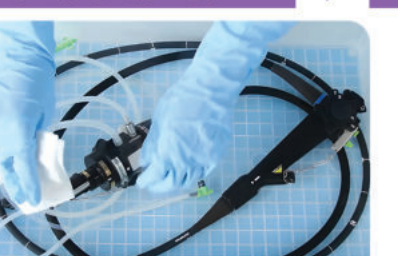

آندوسکوپ را در محلول اسپورسیدین به شکل غوطه ور رها کنید. (حداقل ۱۰ دقیقه) اگر روی بدنه حباب دیدید، با یک گاز تمیز از روی بدنه حذف کنید. درب ظرف را در مدت غوطه وری ببندید.

۱۱ حذف گندزدا از کانال ها




پس از طی زمان کافی برای غوطه وری، با تزریق هوا محلول را از داخل کانال ها تخلیه کنید. آندوسکوپ را از محلول اسپورسیدین خارج کنید.

۱۲ آبکشی سطوح خارجی



آندوسکوپ را در آب دیونیزه غوطه ور کنید. با پارچه استریل بدون پرز روی تمام بدنه بکشید تا از گندزدا پاک شود.

۱۳ آبکشی کانال ها

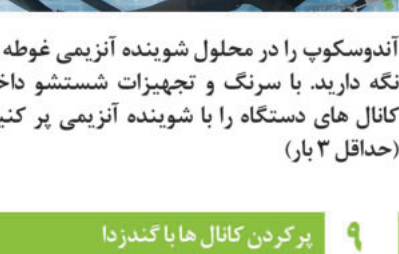

آب دیونیزه را توسط سرنگ به داخل کانال های آندوسکوپ پمپ کنید تا از بقایای گندزدا پاک شود. در انتها هوا تزریق کنید تا آب شستشو از کانال خارج شود.

۱۴ تزریق الکل



آندوسکوپ را از ظرف آب خارج کنید. محلول ۷۰٪ اتانول را به داخل کانال های دستگاه تزریق کنید (مثلا با سرنگ).

۱۵ خشک کردن سطوح داخلی



سپس هوا تزریق کنید تا داخل کانال ها کاملا خشک شود.

۱۶ خشک کردن سطوح خارجی



آندوسکوپ را با گاز یا پارچه استریل بدون پرز خشک کنید.

- محلول اسپورسیدین را به هیچ وجه رقیق یا با محلول های دیگر مخلوط نکنید.
- هنگام کار حتما از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید. پوست یا چشم آلوده شده را سریعاً با آب فراوان بشویید.
- این محلول حداکثر تا ۲۸ روز به شرط کافی بودن غلظت ماده موثره (حداقل ۱/۸٪، کنترل شده توسط نوار تست)، قابل استفاده است.
- از شستشوی دستگاه ها با شوینده های معمولی (مانند مایع ظرفشویی یا دستشویی) قبل از گندزدایی اکیدا پرهیزید. از شوینده آنزیمی تخصصی استفاده کنید.

Ref.: © 2023 Olympus America INC. /Endoscope Disinfection Guide.

Behban Shimi
— Pharmaceutical Company —

Poster: No. HLD-01

Edition: 08.2024

واحد کنترل عفونت بیمارستان