


با استفاده از محلول ضد عفونی کننده سطح بالای اسپورسیدین


ضد عفونی سطح بالا

۱

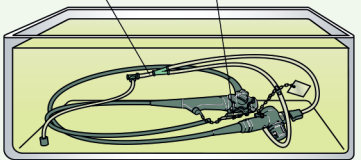


ظرف مخصوص ضد عفونی را با مقدار مناسب از محلول اسپورسیدین پر کنید. بست کانال و شلنگ تزریق را به آندوسکوپ که قبلاً تمیز شده است متصل کنید. سپس آن را در محلول ضد عفونی کننده غوطه ور نمایید.

۲

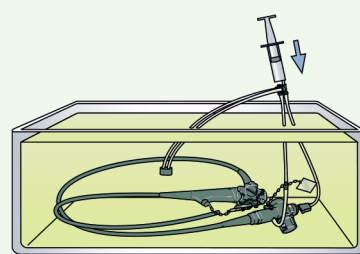


از سرنگ برای پر کردن کانال های هوا، آب و کانال مکش با محلول ضد عفونی کننده استفاده کنید.

۳

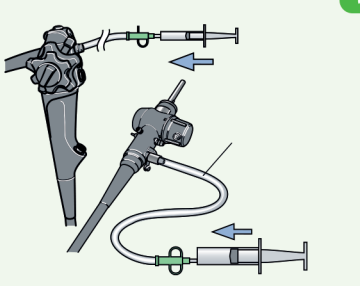

محلول ضد عفونی کننده را با فشار در کانال Elevator-Wire وارد کنید. Elevator را بالا ببرید و مجدداً این کار را تکرار کنید.


۴

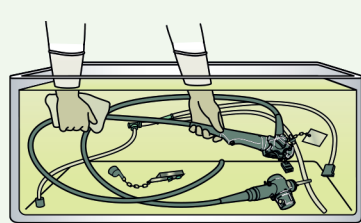

در حالی که آندوسکوپ همچنان غوطه ور است، لوازم کمکی شستشو را جدا کرده و با کمک یک دستمال تمیز بدون پرز حباب های چسبیده به سطح خارجی تجهیزات را پاک کنید.


شستشو

۵

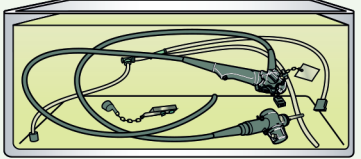


تمام تجهیزات را با توجه به زمان و دمای توصیه شده سازنده محلول اسپورسیدین (۱۰ تا ۴۵ دقیقه در دمای اتاق) غوطه ور نگه دارید. از یک تایمر برای اندازه گیری دقیق زمان غوطه وری استفاده کنید.

۶

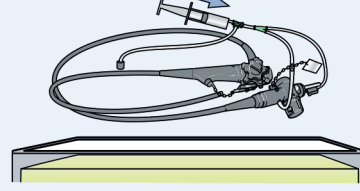


بست کانال و شلنگ تزریق را مجدداً متصل کنید. هوا را به داخل کانال های هوا، آب و مکش تزریق کنید تا ضد عفونی کننده از آن خارج شود. آندوسکوپ را از تانک ضد عفونی کننده خارج کنید.

۷

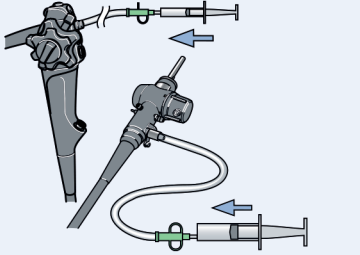

تنها در آندوسکوپ های دارای سیم بالابر یا تغذیه آب مکمل استفاده شود. هوا را به داخل کانال Elevator-Wire جهت خروج ماده ضد عفونی کننده تزریق کنید.


۸

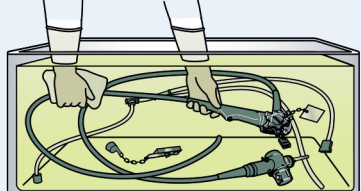

توجه: دستورالعمل های شستشوی ارائه شده توسط سازنده ماده ضد عفونی کننده را انجام دهید. بست کانال و شلنگ تزریق را جدا کنید. آندوسکوپ و قطعات جدا شده را در آب غوطه ور سازید. بطوریکه تمام سطوح خارجی با آب پوشیده شود.


خشک کردن

۹

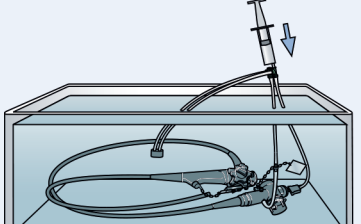


بست کانال و شلنگ تزریق را وصل کنید. با استفاده از یک سرنگ، آب را با فشار به کانالهای هوا، آب و مکش وارد کنید.

۱۰

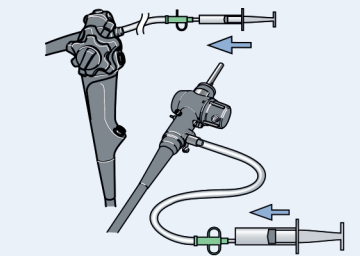


تنها در آندوسکوپ های دارای بالابر سیم یا تغذیه آب مکمل استفاده شود. آب را با فشار به داخل کانال Elevator-Wire وارد کنید.

۱۱

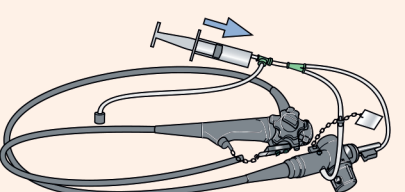

آندوسکوپ را از آب خارج کنید و با استفاده از سرنگ، هوا را به داخل کانال های هوا، آب و ساکشن تزریق کنید تا آب شستشو خارج شود.


۱۲

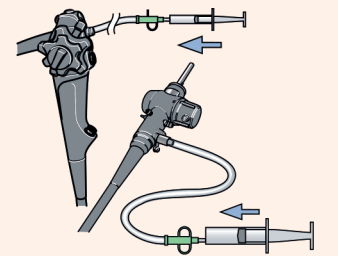

تنها در آندوسکوپ های دارای بالابر سیم یا تغذیه آب مکمل استفاده شود. با تزریق هوا، آب را از کانال Elevator-Wire خارج کنید.


آندوسکوپ را قبل از ضد عفونی کردن با دقت با استفاده از شوینده آنزیماتیک هاساید EZ-30 یا ENZOMEDIC-17 شستشو دهید.

۱۳

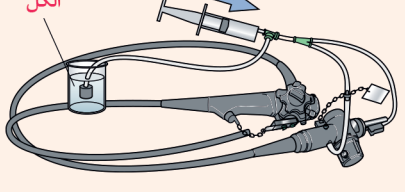


با استفاده از سرنگ، الکل ۷۰ درصد را بداخل کانال های هوا، آب و ساکشن وارد کنید. با تزریق هوا، الکل باقی مانده را خارج کنید.

۱۴

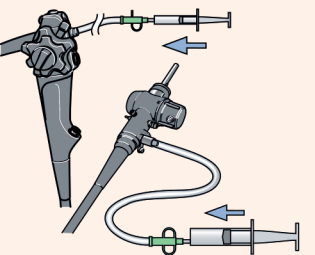

تنها در آندوسکوپ های دارای بالابر سیم یا تغذیه آب مکمل استفاده شود. الکل ۷۰ درصد را با فشار بداخل کانال Elevator-Wire وارد کنید. سپس هوا را برای خارج کردن الکل تزریق نمایید.

۱۵

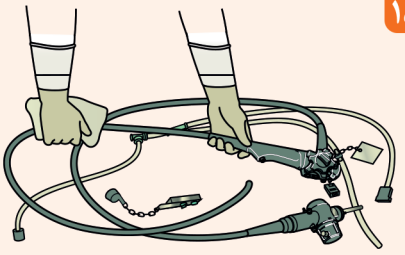

کلیه قطعات جانبی را از آندوسکوپ جدا کنید. آندوسکوپ و قطعات جانبی را با یک دستمال مرطوب شده با الکل خشک کنید. اطمینان حاصل کنید سراسر لوازم قبل از نگهداشت، خشک شده باشند.

نکات مهم

- تجهیزات حفاظت شخصی مناسب بپوشید.
- از ماده ضد عفونی کننده مناسب استفاده کنید و با یک روش صحیح طبق دستورالعمل کارخانه سازنده غلظت ماده موثره را اندازه گیری کنید.
- مطمئن شوید کلیه بخشهای قابل جدا شدن (از جمله شیرها و ...) طبق دستورالعمل، باز فرآوری شده اند.
- در ادامه ضد عفونی سطح بالا آندوسکوپ با آب استریل یا آب فرآوری شده (مثلاً فیلتر شده) با کیفیت میکروبی مناسب شستشو داده شود.

