

با استفاده از محصول سیدین رپید

ابتدا سطح تجهیزات پزشکی مورد نظر را با یک گاز تازه و تمیز پاکسازی نمایید به نحوی که هیچ گونه آلودگی ظاهری شامل قطعات بافتی، خون و ... بر روی آن به جا نماند. بهتر است از گاز مرطوب استفاده کنید.



با استفاده از اسپری سیدی سیدی رپید به خوبی زوایای مختلف سطح تجهیزات پزشکی را اسپری نموده و از آغشته شدن تمامی سطوح به این محلول اطمینان حاصل نمایید. سپس می توانید یک گاز تمیز روی سطوح بکشید.



جهت تکمیل عملیات ضد عفونی حداقل ۶۰ ثانیه صبر کنید.



استانداردهای اروپایی

EN13727

EN14348

EN1040



- موثر بر طیف وسیعی از پاتوژن ها از قبیل میکوباکتریوم ها و ویروسها
- دارای تاییدیه بر اساس استانداردهای اروپایی