

با استفاده از محلول کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده سایسپت HI

* از لوازم محافظت شخصی مناسب استفاده کنید. (دستکش مناسب، عینک ایمنی)



راهنمای مصرف:

کاربرد	غلظت مصرف	زمان اثر گذاری	مدت استفاده مجدد از محلول	نوع میکروب های هدف	استاندارد اثر بخشی	سطح استاندارد	شرایط استاندارد	روش مصرف
ضد عفونی سطح متوسط ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی	۲ درصد	۵ دقیقه	حداکثر ۱۴ روز	باکتری	EN13727/ISIRI10504 EN14561/ISIRI11793	فاز ۱ / ۲ مرحله ۱ فاز ۲ / ۲ مرحله ۲	کثیف	غوطه وری
	۲ درصد	۵ دقیقه	حداکثر ۱۴ روز	مخمر	EN13624/ISIRI19851 EN14562/ISIRI11797	فاز ۱ / ۲ مرحله ۱ فاز ۲ / ۲ مرحله ۲	کثیف	
	۲ درصد	۱۵ دقیقه	حداکثر ۱۴ روز	اسپور قارچ	EN13624/ISIRI19851 EN14562/ISIRI11797	فاز ۱ / ۲ مرحله ۱ فاز ۲ / ۲ مرحله ۲	کثیف	

راهنمای نحوه رقیق سازی برای تهیه محلول با غلظت ۲ درصد:

حجم	۱ لیتر	۵ لیتر	۱۰ لیتر
مقدار برداشتی از محلول کنسانتره	۲۰CC	۱۰۰CC	۲۰۰CC



ترکیبات:

پلی هگزامتیلن بیگوانید هیدروکلراید، دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، آلکیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید، سورفاکتانت غیر یونی، ترکیبات ضد خوردگی، حلال، عوامل تنظیم کننده pH و آب دیونیزه

نکات ایمنی:

- از استفاده همزمان این محصول با مواد پاک کننده و شوینده دیگر خودداری کنید. (به ویژه پاک کننده های آنیونیک همچون پودر و مایع پاک کننده خانگی).
- درپوش ظرف ماده ضد عفونی کننده را همیشه بسته نگه دارید.

مزایای محصول:

- قدرت اثر بخشی بالا در غلظت های پایین و در نتیجه مقرون به صرفه بودن آن
- فاقد اثرات خوردگی بر روی ابزار مورد استفاده در رقت مصرفی
- دارای اثر پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی به طور همزمان
- قابل استفاده در تانک های اولتراسونیک
- فاقد فنول و آلدئید