


راهنمای گندزدایی تجهیزات آندوسکوپی توسط محلول گندزدای سطح بالای هایسپت OPA

پیش‌تمیز کردن

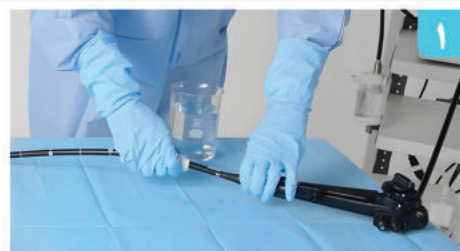

سطوح خارجی آندوسکوپ را با پارچه نم دار به آرامی تمیز کنید.



با ساکشن یا سرنگ، آب و سپس هوا را از داخل کانالها عبور دهید تا از آلودگی های درشت پاک شوند. (با ساکشن حداقل ۱۰ ثانیه/ با سرنگ حداقل ۳ بار)



تجهیزات جانبی اضافی را جدا کنید.

شستشوی دستی



آندوسکوپ را در شوینده آنزیماتیک غوطه ور کنید. با یک پارچه سطوح خارجی را دستمال بکشید. تمامی پورت ها و کانال های دستگاه را با برس نرم و مخصوص برس بکشید.


شستشوی دستی



آندوسکوپ را در محلول شوینده آنزیمی غوطه ور نگه دارید. با سرنگ و تجهیزات شستشو داخل کانال های دستگاه را با شوینده آنزیمی پر کنید. (حداقل ۳ بار)



در حین غوطه وری، سطوح خارجی را با یک پارچه بدون پرز دستمال بکشید. آندوسکوپ را به مدت مورد نیاز در محلول شوینده آنزیمی به حالت غوطه وری قرار دهید.

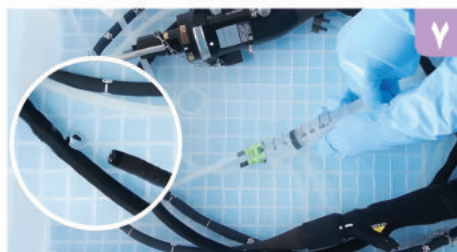

آندوسکوپ را در آب تمیز غوطه ور کنید. با سرنگ آب تمیز را از داخل کانال ها عبور دهید، تا از باقیمانده شوینده پاک شوند. (حداقل ۳ بار) سطوح خارجی آندوسکوپ را نیز بشویید.



آندوسکوپ را از آب خارج کنید. با تزریق هوا کانال ها را خشک کنید. سپس با یک پارچه تمیز بدون پرز آب اضافی را از روی دستگاه خشک کنید.

ضد عفونی کردن



آندوسکوپ را در محلول گندزدای سطح بالای هایسپت OPA غوطه ور کنید. با سرنگ کانال های دستگاه را از محلول پر کنید.



آندوسکوپ را در محلول هایسپت OPA به شکل غوطه ور رها کنید (دقیقا ۱۰ دقیقه). اگر روی بدنه حباب دیدید، با یک گاز تمیز از روی بدنه حذف کنید. درب ظرف را در مدت غوطه وری ببندید.



پس از طی زمان کافی برای غوطه وری، با تزریق هوا محلول را از داخل کانال ها تخلیه کنید. آندوسکوپ را از محلول هایسپت OPA خارج کنید.



آندوسکوپ را در آب دیونیزه غوطه ور کنید. با پارچه استریل بدون پرز روی تمام بدنه بکشید تا گندزدا پاک شود.

شستشو



آب دیونیزه را توسط سرنگ به داخل کانال های آندوسکوپ پمپ کنید تا از بقایای گندزدا پاک شود. در انتها هوا تزریق کنید تا آب شستشو از کانال خارج شود.



آندوسکوپ را از ظرف آب خارج کنید. محلول ۷۰٪ اتانول را به داخل کانال های دستگاه تزریق کنید (مثلا با سرنگ).



سپس هوا تزریق کنید تا داخل کانال ها کاملا خشک شود.



آندوسکوپ را با گاز یا پارچه استریل بدون پرز خشک کنید.



- محلول هایسپت OPA را به هیچ وجه رقیق یا با محلول های دیگر مخلوط نکنید.
- هنگام کار حتما از دستکش نیتریل یا بوتیل و عینک ایمنی استفاده کنید. پوست یا چشم آلوده شده را سریع با آب فراوان بشویید.
- این محصول حداکثر تا ۱۴ روز، به شرط کافی بودن غلظت ماده موثره (کنترل شده توسط نوار تست) قابل استفاده است.
- از شستشوی دستگاه ها با شوینده های معمولی (مانند مایع ظرفشویی یا دستشویی) قبل از گندزدایی اکیدا بپرهیزید. از شوینده آنزیمی تخصصی استفاده کنید.