

دستور العمل عمومی گندزدایی سطح بالای ابزارهای نیمه بحرانی پزشکی توسط محلول گندزدای سطح بالای OPA

وسایل ایمنی مورد نیاز

- گان آستین دار یا پیشبند
- عینک ایمنی یا شیلد صورت
- دستکش آستین دار (ترجیحا نیتریل یا بوتیل)
- تهویه کافی (هواکش، هود یا پنجره)

محلول های مورد نیاز

- محلول کنسانتره شوینده آنزیمی
- محلول گندزدای سطح بالای OPA
- آب سرد و گرم

حجم محلول آماده مورد نیاز	مقدار کنسانتره انزومدیک مورد نیاز
۱ لیتر	۱۰ سی سی کنسانتره و بقیه آب
۲ لیتر	۲۰ سی سی کنسانتره و بقیه آب
۵ لیتر	۵۰ سی سی کنسانتره و بقیه آب

وسایل مورد نیاز:

- برس نرم به تعداد
- سه ظرف یا سینک غوطه وری



گام ۱

ابزارهای آلوده را زیر آب برس بکشید تا بقایای بافتی درشت حذف شود.




گام ۲

محلول ۱٪ شوینده آنزیمی (انزومدیک ۱۷ یا EZ30) را مطابق جدول آماده کنید.




گام ۳

ابزارها را در محلول ۱٪ شوینده آنزیمی (انزومدیک ۱۷ یا EZ30) به مدت مورد نیاز غوطه ور کنید (معمولا ۵ دقیقه زمان کفایت می تواند در پایان این مدت ابزارها را برس کشی کنید).

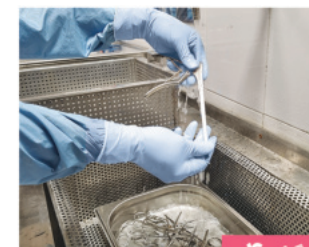

گام ۴

ابزارها را از محلول شوینده آنزیمی خارج کرده و با آب بشویید تا بقایای شوینده پاک شود. آب اضافی ابزارها را بگیرید.

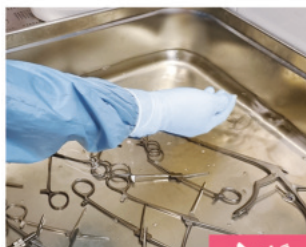

گام ۵

ابزارها را در محلول آماده به مصرف هاپسپت OPA غوطه ور کنید.



گام ۶

درب ظرف را ببندید. حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.



گام ۷

ابزارها را از محلول خارج کنید و در ظرف آب تمیز غوطه ور کنید. روی ابزارها را برس نرم بکشید.



گام ۸

ابزارها را از آب خارج کرده و زیر شیر آب بگیرید و به خوبی بشویید.