

دستورالعمل استفاده از اسپری ضد عفونی کننده سطوح درمانی کوچک با استفاده از محصول هایسپت اس-۱۲۵

نکات ایمنی

- از تماس با چشم جلوگیری شود.
- از تماس پوستی با این محلول جلوگیری شود.
- مناسب برای کلیه سطوح کوچک به ویژه سطوح حساس به الکل



گام ۱

اگر سطح دارای آلودگی ظاهری زیاد است، ابتدا این آلودگی ها را از روی سطح پاک کنید.



گام ۲

محلول هایسپت اس-۱۲۵ را به خوبی روی سطوح اسپری کنید تا سطح کاملاً به محلول آغشته شود و سپس با دستمال تمیز روی سطوح بکشید.



گام ۳

پس از ۵ دقیقه ضد عفونی تکمیل شده است.