

# دستور العمل محلول سازی و ضد عفونی سطح متوسط ابزارهای پزشکی و دندان پزشکی با استفاده از کنسانتره هایسپت اینسترو

## کاربرد محلول اینسترو

- ضد عفونی سطح متوسط ابزارهای پزشکی و دندان پزشکی پیش از استریلیزاسیون

## نکات ایمنی

- هنگام کار با این فرآورده از روپوش، پیشبند، دستکش و محافظ صورت/ عینک ایمنی استفاده کنید.

## ترکیبات و مواد موثره:

PHMB، ترکیبات آمونیوم چهارتایی


## ویژگی ها:

- موثر بر طیف گسترده ای از باکتری ها، مخمرها، و قارچ ها
- فاقد ترکیبات هالوژنه و فتولی
- فاقد ترکیبات آلدهیدی و عدم تثبیت بقایای پروتئینی روی ابزارها
- پاک شوندگی خوب از روی ابزار با آب کشی مناسب



گام ۱

ابتدا کمی آب در ظرف غوطه وری بریزید.

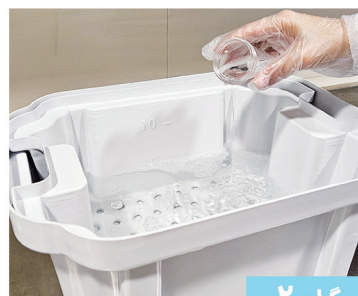

گام ۲

برای تهیه هر لیتر محلول آماده مصرف اینسترو، ۲۰cc از کنسانتره اینسترو را به ظرف غوطه وری اضافه کنید. (از جدول راهنمای رقیق سازی کمک بگیرید.)



گام ۳

با افزودن آب، محلول را به حجم مورد نظر برسانید. محلول را کمی هم بزنید تا به خوبی یکنواخت شود.

## در استفاده از محلول اینسترو

غلظت آماده مصرف: ۲٪


زمان غوطه وری: ۱۵ دقیقه

میکروب های هدف:  
باکتری ها، مخمرها و قارچها  
ویروس های پوشش دار  
و ویروس های بدون پوشش



گام ۴

ابزارهای تمیز و شسته شده را در ظرف غوطه وری، غوطه ور کنید و ۱۵ دقیقه صبر کنید.

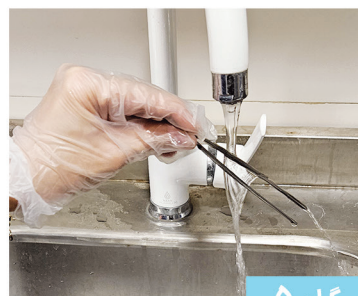

گام ۵

ابزارها را با یک سبد از ظرف غوطه وری خارج کرده و زیر شیر آب بگیرید و بشویید تا باقیمانده محلول از روی ابزار پاک و شسته شود.



گام ۶

ابزارها را با دستمال تمیز بدون پرز خشک کنید و به قسمت بسته بندی برای استریلیزاسیون بفرستید.

## حجم کنسانتره مورد نیاز برای تهیه محلول آماده به مصرف

| حجم محلول آماده مورد نیاز | مقدار برداشت از کنسانتره |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| ۱ لیتر | ۲۰ cc |
|--------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| ۵ لیتر | ۱۰۰ cc |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| ۱۰ لیتر | ۲۰۰ cc |
|---------|--------|